

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗЯТИЮ ОБРАЗЦОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ)

1. Аккуратно откройте упаковку с зондами для взятия образцов ДНК, возьмите один зонд, держа за пластиковый стержень. **ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ЗОНД ТОЛЬКО ЗА ПЛАСТИКОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ. НИКОГДА НЕ КАСАЙТЕСЬ ВАТНОЙ ЧАСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБРАЗЦА**
2. Широко откройте рот, введите зонд в ротовую полость и аккуратно потрите зондом с внутренней стороны одной из щек 10-20 раз, при этом медленно поворачивая его для сбора ротовых (буккальных) клеток. Поместите зонд в подписанный бумажный конверт для образцов ДНК.
3. Повторите то же самое со вторым зондом на другой щеке и поместите его в ТОТ ЖЕ конверт.
4. Отклейте защитную ленту на клапане конверта для образцов ДНК и запечатайте его. Ни в коем случае не используйте слюну для заклейки конверта!
5. Повторите пункты 1-4 для других участников исследования.
6. Перед отправкой в лабораторию, желательно, подсушить конверты при комнатной температуре в течение 30-60 минут.
7. **НЕ** заворачивайте и **НЕ** упаковывайте конверты в пластиковые пакеты, файлы и т.п., т.к. это может отрицательно сказаться на качестве биологического образца.
8. У детей, находящихся на грудном вскармливании, образцы берутся не ранее, чем через 1 час после кормления.
9. Если используются не зонды предоставленные лабораторией, а ватные палочки, приобретенные в аптеке, необходимо перед помещением их в конверт срезать ножницами кончики, за которые Вы держались.
10. Хранить конверты с биологическим материалом необходимо при обычной комнатной температуре!

По всем вопросам просьба обращаться в регистратуру:
8 (499) 125-03-33, 8 (499) 125-19-63